

# Tabata スイミングゴーグル

この度は、弊社スイミングゴーグルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、その後も大切に保管してください。

## 保護者の皆様へ

**お子様がご使用する際、この説明書をお読みになり、お子様が理解できるようご説明ください。**

### 特徴

- 従来のジュニア度付ゴーグルにない、スマートなフォルムで“かっこよく”、“かわいく”装着。ハッキリ見えて保護者も安心です。
- パッドが外れないインサート方式採用。ゴーグルの上げ下げ時にパッドがずれる心配がありません。
- レンズと目の距離を近づける構造で広い視野を確保します。度付レンズと併せ、よりハッキリ見えて快適です。
- 軟性グリップで装着時でも滑りにくく快適。長時間保管でも菌が繁殖しにくい抗菌仕様です。(ISO 022196 適合)
- 競泳用に開発した水膜くもり止め加工を施してありますので、よりクリアな視界で快適なスイミングが楽しめます。
- レンズの素材には、耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しています。
- レンズの光学的特性は、JIS T-7313の規格値に品質管理されています。
- レンズは、紫外線(UV:380nm以下)から目を保護します。

### 警告(守っていただかないと、ケガや事故につながる危険性のある事項)

- 他人に当製品を貸し出す場合には、警告、注意、取扱上の注意、使用後・保管上の注意を十分にご説明の上、必ずこの取扱説明書を添付してください。
- 当製品は、水泳専用のゴーグルです。水泳以外の目的では絶対に使用しないでください。また、潜水用としての使用は危険ですのでおやめください。
- 使用前には常に各部を点検してください。レンズに視界を妨げるようなキズや、ストラップおよびフェイスパッド部分に亀裂やキズがある場合には使用しないでください。
- レンズ(フェイスパッド部分)を顔から前方向に引っ張ると、ストラップの伸縮によって顔や目に当たってケガをする恐れがありますので、スイミングゴーグルの着脱には十分ご注意ください。
- スイミングゴーグルは衝撃によるケガ等から目を保護するための製品ではありません。水中に飛び込む時や、水泳中は常に周囲の安全を確認して、衝突や接触には十分ご注意ください。ゴーグルを着用したまま、海岸や川岸、岩場等で飛び込むことは絶対におやめください。

### 注意(守っていただかないと、間接的にケガや事故につながる可能性のある事項)

- 使用前には必ずストラップと鼻ベルトの長さを調整してください。調整が不十分な場合には水漏れが起こったり、目の周囲に圧迫感を強く感じたりすることがあります。
- 水圧の影響で目が痛くなりますので、深く潜らないでください。
- 長時間使用中、ごくまれにフェイスパッドの密着によって肌に異常(かぶれ、痒み、赤み)が生じることがあります。その場合はただちに使用を中止してください。万一、アレルギー症状が出た場合は専門医の診断を受けてください。


### 取扱上の注意

- **度付レンズは水膜くもり止め加工されており、水分がいきわたることでくもり止め効果があらわれます。使用前に水道水でレンズ内側を水で濡らしてご使用ください。**
- レンズ内側にはくもり止め加工が施されていますので、直接指で触れないようにしてください。
- タオルや爪でこするとキズの発生や、くもり止め加工面(レンズ内側)の白化原因となりますので、絶対におやめください。また、砂等が付着した場合はこすり取らず、必ず水でよくすすぎ洗いをしてください。
- 市販のくもり止め液の中には、レンズのくもり止め性能に悪影響を及ぼすものがあります。当社製くもり止め液をご使用ください。ゴーグル各部に無理な力を加えないでください。変形したり、破損したりすることがあります。
- ストラップをきつく締めすぎると不快に感じたり、目の周りに跡がついたりする場合があります。適度なフィット感が得られる範囲内で調整してください。
- ファンデーションやUVカットクリーム(サンスクリーン)などのスキンケア用品および整髪料などのヘアケア用品等がレンズに付着すると、落ちなくなり、くもり止め効果が著しく損なわれることがありますので十分ご注意ください。

### 使用後、保管上の注意


- 使用後は必ず水でよくすすぎ洗いを行ってください。レンズの内側に水アカや汗・油脂成分等の汚れが付着するとくもりの原因となります。
- 水洗い後は水分を振り切り、十分に陰干しをしてから保管してください。濡れたものと一緒にしたりに水に濡れたまま長時間放置するとくもり止め効果が落ちたりカビ等が発生することがあります。
- 汚れが気になる場合は、市販の中性洗剤をうすめて入れた水で洗い、その後洗剤成分を水で完全に洗い落とすしてください。シンナーやアルコール等の有機系溶剤を汚れ落としに使用すると、変形や変色の原因となりますので使用しないでください。水着、スイミングキャップ、タオルやその他の色物と長時間接触した状態で保管すると、まれに相互の色が移行する場合があります。特に濡れた状態では起こりやすくなりますので、使用後はケースや袋等に入れて持ち運びしてください。
- 夏場の直射日光下や、車のトランクの中、暖房器のそば、サウナ室等、極端に高温になる場所で乾燥させたり、放置したりすると、変形や性能機能劣化の原因となりますのでご注意ください。

## 正しいゴーグルの着脱法

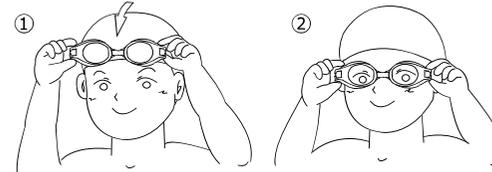


- ① ストラップを両手で広げ、後頭部から確実にかぶせてください。この時、レンズは額に乗った状態になります。続いて左右のレンズを両手で持ちながら、やさしく目にかぶせるように装着してください。
- ② ゴーグルを取る際は、レンズを両手で持ち上げ、ゆっくりと外してください。

## ストラップの調整

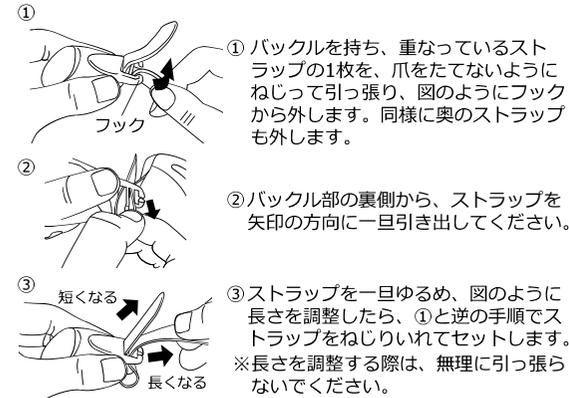


## 鼻ベルトの調整

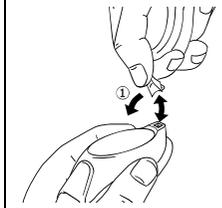

鼻ベルトはXS、S、M、Lの4サイズあります。お好みの長さの鼻ベルトをお選びください。(標準でSサイズの鼻ベルトがセットされています)鼻ベルトは、①の矢印の方向に傾けながら引っ張ると外れます。また、同様に傾けながら、突起部分がしっかりとレンズサイドの穴に入るようにはめ込みます。

## 各部の名称

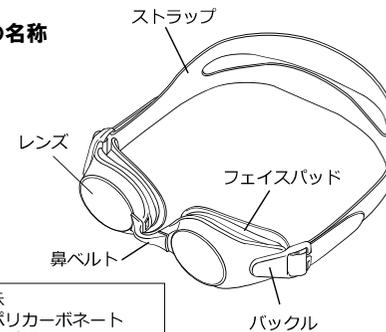

- 品質表示
- レンズ: ポリカーボネート
- バックル: ポリカーボネート
- 鼻ベルト: エラストマー
- フェイスパッド: エラストマー
- ストラップ: シリコン

2014年12月1日 届出番号: 08B3X100020Y7312  
一般医療機器 眼鏡 35065000(JMDNコード) 度付ゴーグル Y7312

【形状・構造及び原理等】  
プラスチック製 屈折力: 0±0.125D  
適切な度数レンズを使用し網膜上に結像させることにより視力を補正します。  
公称寸法は、縦25.0mm、横35.0mm、厚さ2.5mmです。また度数(単位はディオプリー(D))は、レンズに貼り付けたシールに記載してあります。

【性能・使用目的又は効果】 眼鏡  
【品目仕様等】 視力補正用  
【操作方法又は使用方法等】  
既に度付レンズが組み込まれたタイプの商品です。一般のスイミングゴーグルと同様にご使用ください。  
【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 室温で保管してください。  
【包装】 度付レンズ仕様スイミングゴーグル1セット

【製造販売元及び発売元の氏名又は名称及び住所等】  
製造販売元: 株式会社タバタ 発売元: 株式会社タバタ  
茨城県常陸大宮市工業団地651-2 電話番号: 0120-989-023  
A4判の添付文書が必要な場合にはお申し出ください。

## お客様へ

製品には万全を期しておりますが、万一お買上の製品に不備がございましたら、お手数ですがこの取扱説明書をご持参の上、販売店までお持ちください。代品とお取り替えさせていただきます。なお、次の場合の補償、代償につきましては応じかねますのでご容赦ください。

- 事故、誤用、乱用、酷使、不適切な修理または改造による破損や故障。
- 取扱上の不注意による破損や損傷。
- 使用中に生じた外観上の変化(ケース、レンズ、ストラップの傷など)。
- お買い上げ後の運搬、移動、保管上の不備などによる破損や損傷。

■お問い合わせ先 株式会社タバタ 〒130-0005 東京都墨田区東駒形 1-3-17

お客様相談室 TEL.0120-989-023

受付時間: 月曜日～金曜日 9:30～12:00, 13:00～17:00 (土・日・祝を除く)

製品に関するお知らせ・情報は VIEWホームページをご覧ください。 <http://tabata.jp/view/>