



スイミングゴーグル

/SE-030B

届出番号：08B3X100020Y7312 一般医療機器 眼鏡 35065000(JMDNコード) 度付ゴーグル Y7312 【形状・構造及び原理等】 プラスチック製 屈折率：1.585 適切な度数レンズを使用して網膜上に結像させることにより視力を補正します。 公称寸法は、縦25.0mm、横35.0mm、厚さ2.5mmです。また度数（単位はディオプトリー（D））は、レンズに刻印してあります。 【使用目的又は効果】 眼鏡 【使用方法等】 既に度付レンズが組み込まれたタイプの商品です。一般のスイミングゴーグルと同様にご使用ください。 【保管方法及び有効期間等】 室温で保管してください。	2017年11月1日(第2版) 2014年12月1日(第1版)
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売元：株式会社タバタ 茨城県常陸大宮市工業団地651-2 電話番号：0120-989-023	
A4判の添付文書が必要な場合にはお申し出ください。	第2版

この度は、当社スイミングゴーグルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をお読みの上、警告、注意、取扱い上の注意、使用後・保管上の注意をご確認ください。また、この説明書は大切に保管してください。

お子様がスイミングゴーグルを使用する場合は、保護者の方が本書をお読みの上、お子様が理解できるようご説明ください。

特徴

- 従来のジュニア度付ゴーグルにない、スマートなフォルムで“かっこよく”、“かわいく”装着。ハッキリ見えて保護者も安心です。
- パッドが外れないインサート方式採用。ゴーグルの上げ下げ時にパッドがずれる心配がありません。
- レンズと眼の距離を近づける構造で広い視野を確保します。度付レンズと併せ、よりハッキリ見えて快適です。
- 軟性パッドで装着時でも滑りにくく快適。長時間保管でも菌が繁殖しにくい抗菌仕様です。(ISO 022196 適合)
- 競泳用に開発した水膜くもり止め加工を施してありますので、よりクリアな視界で快適なスイミングが楽しめます。
- レンズの素材には、耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しています。
- レンズの光学特性は、JIS T-7313の規格値に品質管理されています。
- レンズは、紫外線（UV:380nm以下）から目を保護します。

警告（取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがある事項）

- 本製品は水泳専用のゴーグルです。水泳以外の目的には絶対に使用しないでください。また、潜水用としての使用は危険ですのでおやめください。
- 使用前には必ず各部を点検してください。レンズに視界を妨げるようなキズや、ストラップおよびフェイスパッド部分に亀裂やキズがある場合には使用しないでください。
- レンズ（フェイスパッド部分）を顔から前方向に引っ張ると、ストラップの伸縮によって顔や目に当たってケガをする恐れがありますので、スイミングゴーグルの着脱には十分ご注意ください。
- スイミングゴーグルは衝撃によるケガ等から目を保護するための製品ではありません。水中に飛び込む時や、水泳中は常に周囲の安全を確認して、衝突や接触には十分ご注意ください。ゴーグルを着用したまま、海岸や川岸、岩場等で飛び込むことは絶対にやめください。
- 他の人に本製品を貸し出す場合には、警告、注意、取扱い上の注意、使用後・保管上の注意を十分にご説明の上、必ずこの取扱説明書を添付してください。

注意（取り扱いを誤った場合、傷害または物的損害が発生することがある事項）

- 使用前には必ずストラップと鼻ベルトの長さを調整してください。調整が不十分な場合には水漏れが起こったり、目の周囲に圧迫感を強く感じたりすることがあります。
- 水圧の影響で目が痛くなりますので、深く潜らないでください。
- 長時間使用中、ごくまれにフェイスパッドの密着によって肌に異常（かぶれ、痒み、赤み）が生じることがあります。その場合はただちに使用を中止してください。万一、アレルギー症状が出た場合は専門医の診断を受けてください。

取扱い上の注意

- 度付レンズ内側には水膜くもり止め加工がされており、水分がレンズ面にいきわたることでくもり止め効果があらわれます。使用前にレンズ内側を水で濡らしてからご使用ください。

- レンズ内側にはくもり止め加工が施されていますので、直接指で触れないようにしてください。
- くもり止め液は、必ず当社製品を使用してください。市販のくもり止め液の中には、プラスチック素材を侵してひび割れを起こさせるものがあります。
- ゴーグル各部に無理な力を加えないでください。変形したり、破損したりする可能性があります。
- ストラップをきつく締めすぎると不快に感じたり目の周りに跡がついたりする可能性があります。適度なフィット感が得られる範囲内で調整してください。
- タオルや爪でレンズ面をこすらないでください。キズの発生や、くもり止め加工面（レンズ内側）の白化原因となります。また、砂などが付着した場合はこすり取らず、必ず水でよくすすぎ洗いをしてください。
- ファンデーションや UV カットクリーム（サンスクリーン）、整髪剤などがフェイスパッドやレンズに付着すると、落ちなくなる可能性があります。

使用後、保管上の注意

- 使用後は必ず水でよくすすぎ洗いを行ってください。レンズ内側に水アカや汗・油脂成分等の汚れが付着するとくもりの原因となります。
- 水洗い後は水分を振り切り、十分に陰干しをしてから保管してください。水に濡れたまま長時間放置するとカビなどが発生することがあります。
- 汚れが気になる場合は、中性洗剤をうすめて入れた水（メーカー指定の食器洗い同等）で洗ってください。洗浄後は必ず水でよくすすぎ洗いを行ってください。洗剤成分が少しでも残っていると、プラスチック素材を侵してひび割れが起こる可能性があります。
- シンナーやアルコール等の有機系溶剤を汚れ落としに使用しないでください。変形や変色の原因となります。
- 水着、スイミングキャップ、タオルやその他の色物と長時間接触した状態で保管すると、まれに相互の色が移行する場合があります。特に濡れた状態では起こりやすくなりますので、使用後はケースや袋等に入れて持ち運びしてください。
- 夏場の直射日光下や、車のトランクの中、暖房器のそば、サウナ室など極端に高温になる場所で乾燥させたり、放置したりすると、変形や性能劣化の原因となります。

正しいゴーグルの着脱法

- ①


- ②


- ①ストラップを両手で広げ、後頭部から確実にかませてください。この時、レンズは顔に乗った状態になります。続いて左右のレンズを両手で持ちながら、やさしく目にかぶせるように装着してください。

②ゴーグルを取る際は、レンズを両手で持ち上げ、ゆっくりと外してください。

ストラップの調整

- ①


- ②

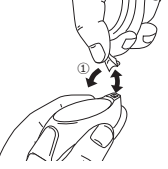

- ③


- ①バックルを持ち、重なっているストラップの1枚を、爪をたてないようにねじって引っ張り、図のようにフックから外します。同様に奥のストラップも外します。

②バックル部の裏側から、ストラップを矢印の方向に一旦引き出してください。

③ストラップを一旦ゆるめ、図のように長さを調整したら、①と逆の手順でストラップをねじりいれてセットします。
※長さを調整する際は、無理に引っ張らないでください。

鼻ベルトの調整

- 
- 鼻ベルトはXS、S、M、Lの4サイズあります。お好みの長さの鼻ベルトをお選びください。（標準でSサイズの鼻ベルトがセットされています）
鼻ベルトは、①の矢印の方向に傾けながら引っ張ると外れます。また、同様に傾けながら、突起部分がしっかりとレンズサイドの穴に入るようにはめ込みます。

各部の名称



- 品質表示
レンズ：ポリカーボネート
バックル：ポリカーボネート
鼻ベルト：エラストマー
フェイスパッド：エラストマー
ストラップ：シリコーン

お客様へ

製品には万全を期しておりますが、万一お買い上げの製品に不備がございましたら、お手数ですが現品とともにこの取扱説明書およびご購入時のレシート（もしくは領収書）をお買い求めいただきました店舗にお持ちください。代品とお取り替えさせていただきます。尚、次の場合の補償、代償につきましては応じかねますのでご容赦ください。

- 事故、誤用、乱用、酷使、不適切な修理または改造による破損や故障
- 取扱い上の不注意による破損や損傷
- 使用中に生じた外観上の変化（ケース、レンズ、ストラップの傷など）
- お買い上げ後の運搬、移動、保管上の不備などによる破損や損傷

■お問い合わせ先 株式会社タバタ 〒130-0005 東京都墨田区東駒形 1-3-17

お客様相談室 TEL.0120-989-023

受付時間：月曜日～金曜日 9：30～12：00、13：00～17：00（土・日・祝を除く）

製品に関するお知らせ・情報は VIEWホームページをご覧ください。 <http://tabata.jp/view/>